
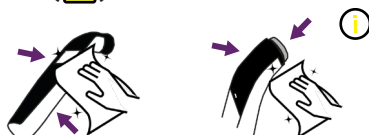


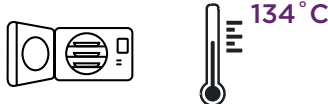


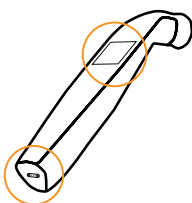
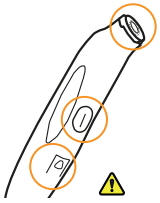

PROCÉDURES DE DÉSINFECTION ET DE STÉRILISATION

ÉTAPES	EMBOUTS DE CALIBRATION	APPAREIL DEXTA CHROMA
- 1 - DÉSINFECTION	<p>LINGETTES AUTORISÉES (⚠)</p> <p>INT / EXT</p> 	 <p>SÉCHAGE</p> 
- 2 - RINÇAGE	<p>RINCER ABONDAMMENT À L'EAU</p> <p>INT / EXT</p> 	
- 3 - STÉRILISATION	<p>STÉRILISATION À L'AUTOCLAVE</p> 	

⚠ Lingettes désinfectantes pour surfaces de dispositifs médicaux non invasifs ayant des propriétés *bactéricides, fongicides, virucides* et *tuberculocides*. Veuillez respecter les consignes du fabricant (temps de contact requis). Voir ci-dessous pour les zones à risque.





ⓘ Ce protocole de désinfection de l'appareil, obligatoire après chaque utilisation pour éviter les contaminations croisées.

ZONES À RISQUE EN CAS D'UTILISATION EXCESSIVE DE PRODUITS DÉSINFECTANTS

<p>ÉCRAN ET CONNECTEURS</p> 	<p>TÊTE DE MESURE ET BOUTONS</p> 	<p>CONNECTEURS DU SOCLE</p> 
---	--	--

⚠ PAS DE NETTOYAGE SI LE PACK BATTERIE EST DÉCONNECTÉ.

PRODUITS ET PROCESSUS NON CONFORMES

<p>LINGETTES TRÈS IMBIBÉES</p> 	<p>SOLUTION PULVÉRISABLE</p> 	<p>BAIN DE DÉCONTAMINATION</p> 	<p>BAIN À ULTRASONS</p> 
--	--	---	---