


## BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DU DEXTA CHROMA

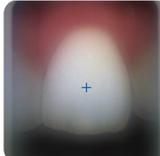

- ✓ LES BORDS GRIS PARALLÈLES AUX BORDS DE L'IMAGE
- ✓ BOUCHE OUVERTE ET RESPIRATION PAR LE NEZ
- ✓ LIMITATION DE LA SALIVE
- ✓ DENT CENTRÉE, SANS ANGLE OU INCLINAISON
- ✓ EMBOUT SOUS LA LÈVRE
- ✓ EMBOUT EN CONTACT AVEC LES DENTS ADJACENTES
- ✓ EMBOUT EN CONTACT AVEC LA GENCIVE
- ✓ NE PAS BOUGER LE TEMPS DE L'ACQUISITION (1s)

## MAUVAISES PRATIQUES

<b>EMBOUT MAL POSITIONNÉ</b> 	<b>BOUCHE FERMÉE</b> 	<b>CONDENSATION</b> 	<b>PRESSION EXCESSIVE SUR LA GENCIVE</b> 
<b>DENT MAL CENTRÉE</b> 	<b>MAUVAIS ANGLE</b> 	<b>MAUVAISE INCLINAISON</b> 	<b>LÈVRE VISIBLE</b> 

## EMBOUTS DE CALIBRATION

LE NON RESPECT DES PROCÉDURES DE DÉSINFECTION ET STÉRILISATION PROVOQUE UNE DÉGRADATION PRÉMATURÉE DES EMBOUTS.

UN EMBOUT DE CALIBRATION DÉGRADÉ (DÉCOLORATION, ASPECT MODIFIÉ,...) DOIT ÊTRE CHANGÉ.

DURÉE DE VIE VÉRIFIÉE POUR 100 PASSAGES DE CYCLE DE STÉRILISATION À L'AUTOCLAVE.



**EMBOUT ENDOMMAGÉ**  
Aspect interne et/ou externe brillant et collant



**EMBOUT NEUF**  
Aspect interne et extérieur gris et mat